

# Mylan HIV Self Test

est le seul dispositif d'Auto-Test  
du VIH intégré dans le monde<sup>1</sup>

Préqualifié par  
**l'OMS<sup>2</sup>**



Sans danger<sup>1</sup>



Pratique<sup>1</sup>



Exact<sup>1</sup>




- ✓ Élimine le besoin de plusieurs composants de test<sup>1</sup>
- ✓ Réduit les erreurs des utilisateurs<sup>1</sup>
- ✓ Simplifie les procédures de test<sup>1</sup>
- ✓ Améliore l'exactitude du test<sup>1</sup>

# Mylan HIV Self Test est facile à utiliser

## Étape 1

Appuyez sur le bouton gris pour vous piquer le doigt lancette intégrée.<sup>1</sup>  
Appuyez fortement

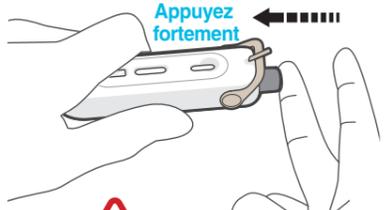


**IMPORTANT**  
Il ne pique qu'une seule fois!

MOITIÉ PLEIN  
**IMPORTANT**  
Le tube doit être plein

PLEIN  
Le tube sanguin a maintenant la bonne quantité de sang

## Étape 2

Remplissez le tube sanguin avec du sang. Si le tube sanguin n'est pas plein, pincez votre doigt et ajoutez plus de sang.<sup>1</sup>

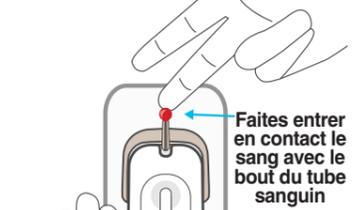

Faites entrer en contact le sang avec le bout du tube sanguin

## Étape 3

Maintenez le test sur la table. Maintenant, faites basculer le tube sanguin vers le puits.<sup>1</sup>




**IMPORTANT**  
Vérifiez que le sang est passé du tube sanguin au puits

Basculez

## Étape 4


Ajoutez 4 gouttes de liquide d'essai dans le puits.<sup>1</sup>

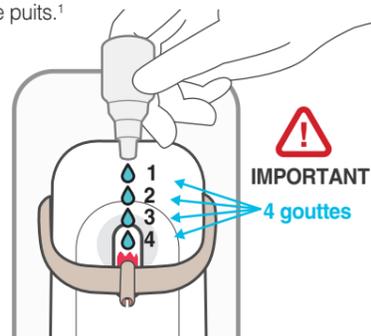

**IMPORTANT**  
4 gouttes

## Étape 5

Attendez 15 minutes avant de lire le résultat. N'attendez pas plus de 20 minutes.<sup>1</sup>

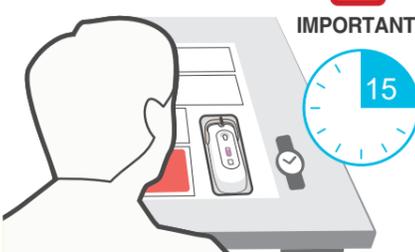

**IMPORTANT**  
15

## — Séronégatif

Si une ligne apparaît au C, votre êtes séronégatif. Il ne doit y avoir aucune ligne au T.

Ceci est un test de dépistage.

Refaites le test après 3 mois.

Consultez la carte de soins incluse pour plus d'informations.




## ? Le test n'a pas marché

Si aucune ligne n'apparaît au C, le test n'a pas marché.

Ceci est un test de dépistage. Rendez-vous à une clinique pour des tests supplémentaires.



Consultez la carte de soins incluse pour plus d'informations.

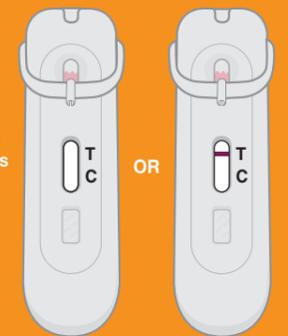


## + Séropositif

Si deux lignes apparaissent, même si elles sont floues, votre test VIH est positif.

Ceci est un test de dépistage. Rendez-vous à une clinique pour des tests supplémentaires.



Consultez la carte de soins incluse pour plus d'informations.

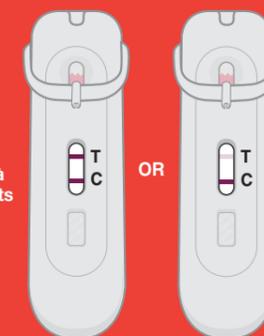


Pour plus d'informations et pour visionner la vidéo de la procédure de test étape par étape, rendez-vous sur : <https://www.ez2uzhivselftest.com>

**Remarque importante:** Lavez-vous et séchez-vous les mains avant d'effectuer le test. Le mode d'emploi fourni avec l'emballage doit être lu attentivement avant d'effectuer le test.

Ceci est un test de dépistage. Si votre résultat est interprété comme « séronégatif », effectuez un test après 3 mois. Si votre résultat est interprété comme « le test n'a pas marché » ou « séropositif », rendez-vous à une clinique pour des tests supplémentaires.

# Mylan HIV Self Test

est reconnu pour son design innovant\*

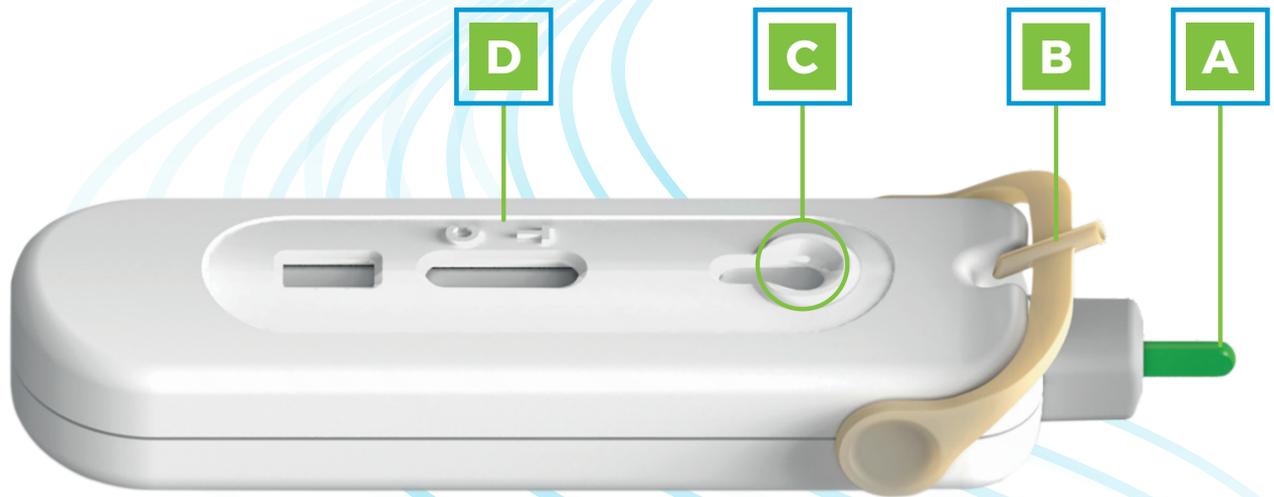

A

## Lancette de sécurité intégrée<sup>1</sup>

La lancette de sécurité auto-rétractable élimine le risque de blessures dangereuses par des objets tranchants en verrouillant l'aiguille à l'intérieur du dispositif après son utilisation pour une élimination sans danger.

B

## Prélèvement de sang précis<sup>1</sup>

L'unité de prélèvement sanguin facile à utiliser est conçue pour prélever exactement le bon volume d'échantillon (10µl), assurant la performance optimale du test.

C

## Distribution de sang facile<sup>1</sup>

Le sang est distribué proprement sur la bandelette-test en pivotant simplement l'unité de prélèvement sanguin.

D

## Interprétation facile du résultat<sup>1</sup>

Le résultat du test est affiché clairement en seulement 15 minutes.

\*1



### Références:

1. Données sur dossier.

2. WHO PQ Public Report ; Version 1.0; July 2019.

Disponible sur: [https://www.who.int/diagnostics\\_laboratory/evaluations/pq-list/190708\\_pqdx\\_0320\\_090\\_00\\_pqpr\\_mylan\\_hiv\\_self\\_test.pdf](https://www.who.int/diagnostics_laboratory/evaluations/pq-list/190708_pqdx_0320_090_00_pqpr_mylan_hiv_self_test.pdf); Accédé le 1st April 2020

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

#### Mylan Pharmaceuticals Private Limited

No. 32/1 & 2, 34/1 to 4, 7th to 12th Floor,  
Prestige Platina Block 3, Kadubeesanahalli Village,  
Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bangalore East Taluk,  
Bangalore – 560 103.  
Tel: +91 80 6672 8000  
Fax: +91 80 6672 8899  
E – mail: [mylan.india@mylan.in](mailto:mylan.india@mylan.in)  
Website: [www.mylan.in](http://www.mylan.in)

#### Siège social

Mylan Pharmaceuticals Private Limited,  
Plot No.564/A/22, Road No.92,  
Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana,  
India, 500096  
CIN: U73100MH1997PTC106267

Pour plus d'informations,  
rendez-vous sur :  
<https://www.ez2uzhivselftest.com>



Suivez-nous sur:



#ez2uzhivselftest

 **Mylan**

Better Health  
for a Better World