

Thiết bị Tự Xét nghiệm HIV Mylan

là thiết bị tự xét nghiệm HIV được tích hợp duy nhất trên thế giới¹



An toàn¹



Thuận tiện¹



Chính xác¹

✓ Loại bỏ nhiều thành phần xét nghiệm riêng lẻ¹

✓ Giảm lỗi người dùng¹


✓ Đơn giản hóa quy trình xét nghiệm¹

✓ Cải thiện độ chính xác của xét nghiệm¹

Thiết bị Tự Xét nghiệm HIV Mylan Dễ Sử dụng



Bước 1

Nhấn nút màu xám để chích ngón tay bằng lưỡi chích được trang bị¹

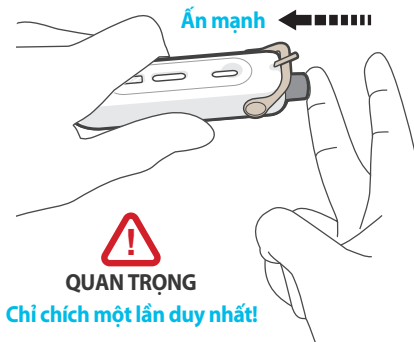


Bước 2

Nạp máu vào đầu ống máu. Nếu ống máu không đầy, hãy tiếp tục nặn ngón tay để lấy thêm máu.¹

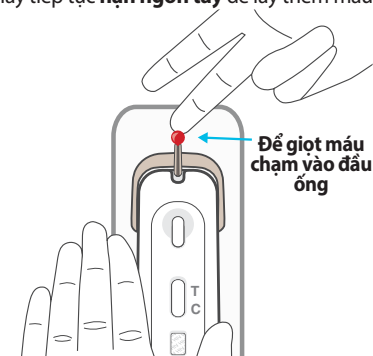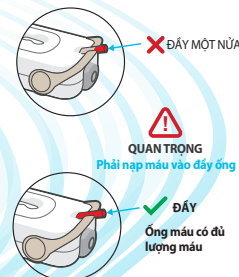


Bước 3

Giữ thiết bị xét nghiệm trên bàn. Lật ống máu về phía lỗ chứa máu.¹

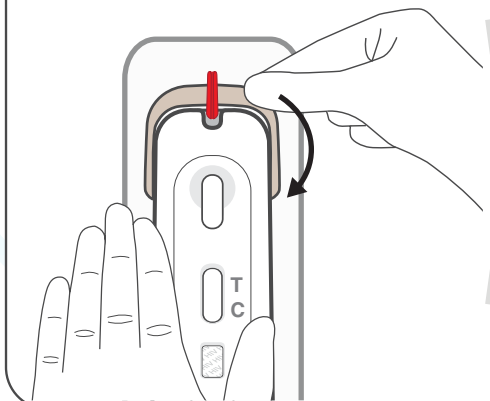


QUAN TRỌNG
Kiểm tra để đảm bảo máu đã di chuyển từ ống vào lỗ chứa máu

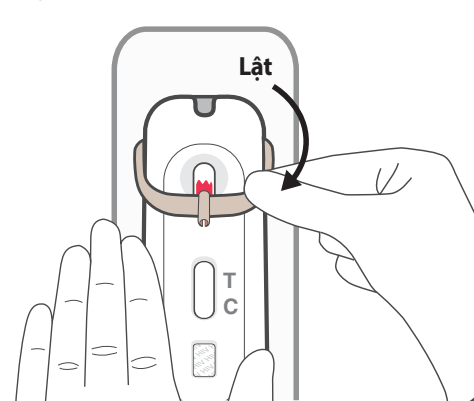


Bước 4

Nhỏ 4 giọt dung dịch thử vào lỗ chứa máu.¹

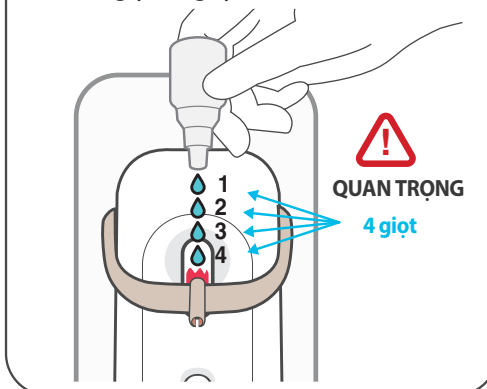

Bước 5

Đợi 15 phút trước khi đọc kết quả. Không đợi lâu hơn 20 phút¹.

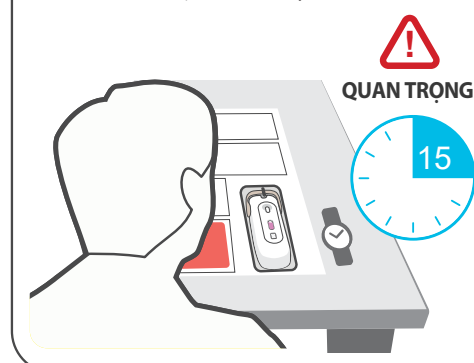

— HIV âm tính

Nếu một vạch xuất hiện tại C, kết quả xét nghiệm là HIV âm tính. Sẽ không có vạch nào xuất hiện tại T.

Đây là thiết bị xét nghiệm sàng lọc.
Vui lòng xét nghiệm lại sau 3 tháng.

Xem thẻ chăm sóc kèm theo để biết thêm thông tin.




? Xét nghiệm không có kết quả

Nếu không có vạch nào xuất hiện tại C nghĩa là xét nghiệm không có kết quả.

Đây là xét nghiệm sàng lọc. Hãy đến phòng khám để xét nghiệm thêm.



Xem thẻ chăm sóc kèm theo để biết thêm thông tin.

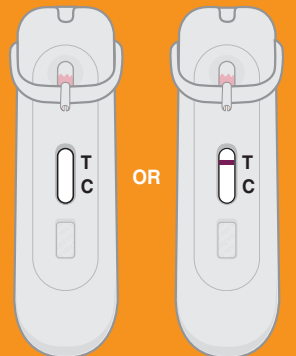


+ HIV dương tính

Nếu hai vạch xuất hiện, ngay cả khi vạch mờ, kết quả xét nghiệm là HIV dương tính.

Đây là xét nghiệm sàng lọc. Hãy đến phòng khám để xét nghiệm thêm.



Xem thẻ chăm sóc kèm theo để biết thêm thông tin.

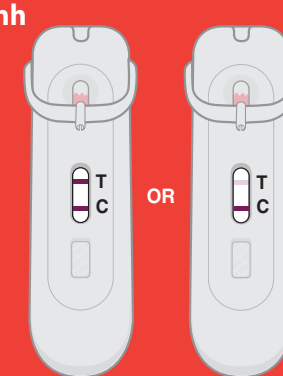


Để biết thêm thông tin và xem video quy trình xét nghiệm từng bước, vui lòng truy cập:
<https://www.mylanez2uz.com>

Lưu ý Quan trọng: Rửa và lau khô tay trước khi thực hiện xét nghiệm. Cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đi kèm theo hộp bao trước khi thực hiện xét nghiệm. Đây là một xét nghiệm sàng lọc. Nếu kết quả cho ra "HIV âm tính", vui lòng xét nghiệm lại sau 3 tháng. Nếu kết quả cho ra "Xét nghiệm không có kết quả" hoặc "HIV Dương tính", hãy đến phòng khám để xét nghiệm thêm.

Thiết bị Tự Xét nghiệm HIV Mylan

được công nhận nhờ vào thiết kế đổi mới*

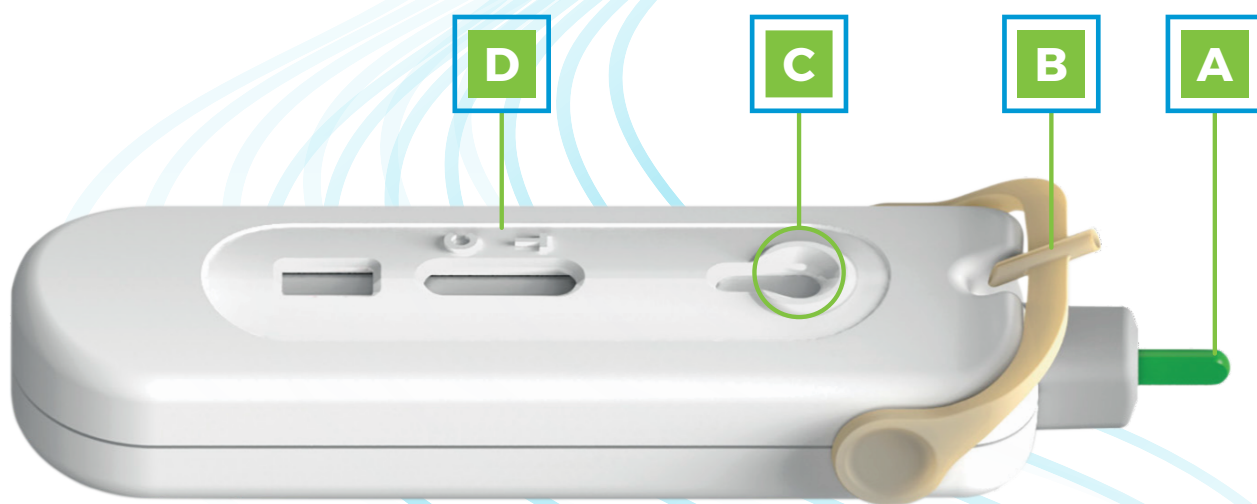

A

Lưỡi chích An toàn được Tích hợp sẵn¹

Lưỡi chích an toàn tự động thu lại giúp loại bỏ nguy cơ chấn thương do vật sắc nhọn nguy hiểm bằng cách khóa mũi kim bên trong thiết bị sau khi sử dụng để thải bỏ một cách an toàn.

B

Lấy Máu Chính Xác¹

Bộ lấy máu dễ sử dụng được thiết kế để lấy chính xác lượng máu cần thiết (10µl), đảm bảo hiệu suất xét nghiệm tối ưu.

C

Truyền Máu Đơn Giản¹

Máu được truyền dễ dàng đến que thử bằng cách xoay bộ lấy máu.

D

Dễ dàng Đọc hiểu Kết quả¹

Kết quả xét nghiệm được hiển thị rõ ràng chỉ trong 15 phút.

*1



Tài liệu tham khảo:

1. Data on file.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Mylan Pharmaceuticals Private Limited

No. 32/1 & 2, 34/1 to 4, 7th to 12th Floor,
Prestige Platina Block 3, Kadubeesanahalli Village,
Varthur Hobli, Outer Ring Road, Bangalore East Taluk,
Bangalore – 560 103.
ĐT: +91 80 6672 8000
Fax: +91 80 6672 8899
E – mail: mylan.india@mylan.in
Website: www.mylan.in

Trụ sở đã đăng ký

Mylan Pharmaceuticals Private Limited,
Plot No.564/A/22, Road No.92,
Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana,
India, 500096
CIN: U73100MH1997PTC106267

Để biết thêm thông tin
vui lòng truy cập:

www.ez2uzhivselftest.com



Theo dõi chúng tôi trên:



##ez2uzhivselftest

Mylan

Better Health
for a Better World